

Modell 1002

# Transportwagen für Umhängelifter

Für den ergonomisch idealen Transport



- Ohne Anstrengung von einem Raum zum anderen
- Schont Rücken und Gelenke der Pflegeperson
- Umhänge-Deckenlifter wird einfach abgesenkt und ausgehängt
- Kompakt und solide, aus rostfreiem Edelstahl
- Hochwertige leichtgängige Rollen für beste Manövrierbarkeit

Hebehilfen für Menschen mit Handicap


[www.handimove.de](http://www.handimove.de)

# Transportwagen für Umhängelifter


## Abmessungen und Angaben

A.....	Höhe des Fahrgestells: .....	19 cm
B.....	Radhöhe: .....	13 cm
C.....	Gesamthöhe: .....	126,5 cm
D.....	Länge des Fahrgestells: .....	41 cm
E.....	Breite des Fahrgestells: .....	51 cm
F.....	Breite Oberseite .....	9 cm
G.....	Breite Unterseite .....	50 cm


Material: ..... Edelstahl  
Gewicht: ..... 7,5 kg

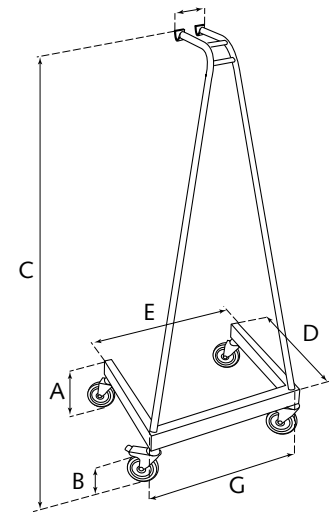


## Betriebsanweisung

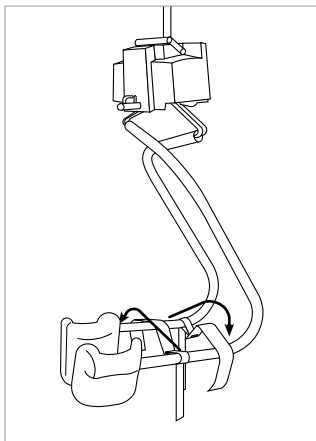


Hängen Sie die Beinstützen über den gegenüberliegenden Arm des Hebebügels.

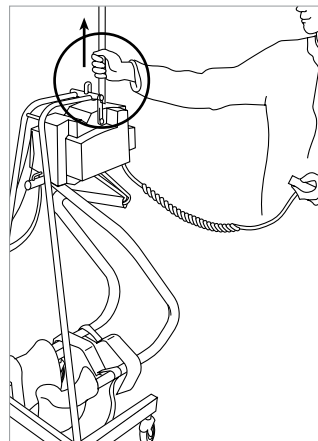

Lassen Sie den Griff des Umhängelifters in seiner Halterung einrasten. Achtung: Sie müssen noch etwas am Band ziehen, während Sie auf den unteren Knopf der manuellen Bedienung drücken, um den Umhängestab zu entfernen.

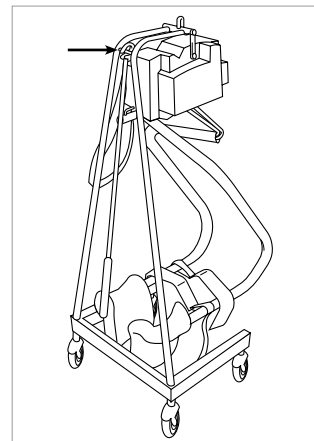

Hängen Sie den Umhängestab an den Transportwagen und rollen Sie das Gerät in das nächste Zimmer.

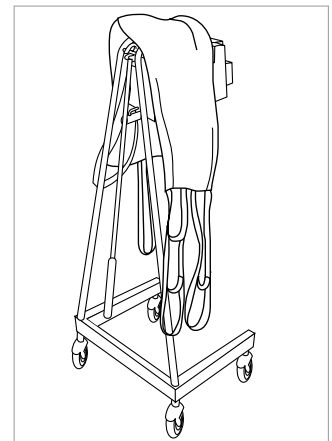

Alternative:  
Der Transportwagen kann auch zusammen mit einem Hebetuch verwendet werden.

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an

